

PRESTIGE VDX 5:1

Prestige VDX 5: 1 Additionssilikon auf Polyvinylsiloxan-Basis für die Abnahme von hochpräzisen Gebissabdrücken unter Verwendung automatischer Mischsysteme.

Prestige VDX 5:1 eignet sich für Korrekturabdrücke oder erste Abdrücke im Rahmen des Doppelabdruckverfahrens. Das Produkt ist mit den meisten marktüblichen A-Silikonen für Zweitabdrücke chemisch verträglich.

Prestige VDX 5: 1 ist ideal für die rasche, homogene und blasenfreie Verwendung in automatischen Mischsystemen wie Pentamix®, Pentamix® 2, Plug & Press® Dispenser oder MixStar.



Ausschließlich für den zahntechnischen Gebrauch bestimmt.

Technische Daten

ISO 4832 / ADA 19	Type 1 Heavy -Bodied consistency
Mischungsverhältnis Base:Katalysator	5:1
Verarbeitungszeit inklusive Mischdauer*	1'45''
Verbleiben im Mundraum**	2'
Abbindezeit*	5'30''
Aushärtezeit*	4'
Verformung bei Kompression	2%
Elastische Erholung	>99.4%
Formstabilität	<-0.20%
Shore-A-Härte	70
Farbe	Orange red

*Die o. g. Zeiten beziehen sich auf einen Mischbeginn bei 23°C/73°F. Höhere Temperaturen verkürzen diese Zeiten, niedrigere Temperaturen verlängern sie.

Gebrauchsvorbereitung – Anweisungen

Die Lasche leicht nach oben drücken, um den Verschluss von der Patrone abziehen zu können; die Patrone dabei mit den Austrittsöffnungen nach oben halten.

Die Patrone den Anweisungen des Dispenser-Herstellers gemäß in das Gerät einführen.

Das Gerät einschalten und so lange Material austreten lassen, bis die beiden Komponenten (Base und Katalysator) gleichmäßig austreten.

Nun die Mischspitze energisch einführen und sicherstellen, dass sie fest und sicher sitzt.

Den Feststerring über die Mischspitze schieben, bis die Arretierung erreicht ist und schließlich durch eine Rechtsdrehung fixieren.

Das Gerät erneut einschalten und die gewünschte Materialmenge auf dem Abformlöffel verteilen. Den Abformlöffel dabei schräg halten.

Die benutzte Mischspitze nach der Verwendung als Verschlusersatz auf der Patrone lassen.

Vor der nächsten Verwendung den Feststellring lösen und abziehen, die Mischspitze abnehmen und sicherstellen, dass die Austrittsöffnungen der Patrone nicht verstopft sind.

Danach die oben stehenden Anweisungen von Anfang an ausführen.

Abdruckabnahme

Bei Abformlöffeln ohne Bohrungen ist ein Einsatz von Prestige Universal Adhesive ratsam. Den mit Prestige VDX 5: 1 versehenen Abformlöffel in den Mundraum einführen, einen leichten Druck ausüben und diese Position bis zur kompletten Erhärtung beibehalten. Zur Überprüfung der fortschreitenden Erhärtung das Material im Mund des Patienten kontrollieren.

WICHTIG: Vor der Abnahme des zweiten Abdrucks muss der erste einwandfrei gewaschen und getrocknet werden: Auf diese Weise lässt sich eine perfekte Haftung zwischen dem ersten und dem zweiten Abdruck gewährleisten.

Desinfektion

Nach Abnahme des Abdrucks diesen vorsichtig aus dem Mundraum entfernen und unter fließendem Wasser von Materialspuren und Speichel befreien. Die mit VDX 5:1 genommenen Abdrücke lassen sich durch Eintauchen in eine 2%-ige Glutaraldehyd-Lösung, eine 0,5%-ige Natriumhypochlorit-Lösung oder in spezifische, handelsübliche Produkte desinfizieren, ohne verändert zu werden.

Die mit Prestige VDX 5:1 angefertigten Abdrücke können mit Silber oder Kupfer galvanisiert werden.

Gussvorgang

Der Abdruck ist nach Ablauf einer Zeit von mindestens 1 Stunde nach erfolgter Polymerisierung unverzüglich zu gießen. Die Silikone auf Polyvinylsiloxan-Basis aus der Reihe Prestige sind mit den besten auf dem Markt erhältlichen Gipsen (z.B.: Class III - Hydrocal Kerr ® , Class IV – Fujirock GC®) kompatibel.

Achtung

Bei der Verwendung von Prestige VDX 5:1 müssen die hier aufgeführten Anweisungen genau befolgt werden. Eventuelle anderweitige, von diesen Verwendungsanweisungen nicht vorgesehene Verfahren fallen in den ausschließlichen Verantwortungsbereich des Anwenders.

Den Original-Patronenverschluss aufbewahren, um die Patrone bei längerer Nichtbenutzung verschließen und eventuelle Verstopfungen vermeiden zu können. Vor Aufsetzen des Verschlusses sicherstellen, dass dieser vollkommen sauber und frei von Materialspuren ist; außerdem auf eine ordnungsgemäße Anbringung achten, da sich die Materialerhärtung nur so verhindern lässt.

Eventuelle Spuren von vor der Abdruckabnahme verwendeten Waschlösungen oder Extraktionslösemitteln sorgfältig beseitigen, da diese sonst der Materialerhärtung entgegenwirken könnten.

Elastomere sind chemisch beständig; eine Berührung mit Kitteln und sonstiger Bekleidung sollte daher möglichst vermieden werden.

Prestige VDX 5:1 aufgrund chemischer Unverträglichkeit nicht zusammen mit Kondensationssilikonen, Polyethern oder Polysulfiden verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen

Jede Berührung des Katalysators mit den Augen vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt die Augen sofort gründlich spülen und unverzüglich einen Augenarzt aufsuchen.

Bei Überempfindlichkeit gegenüber den Bestandteilen des Erzeugnisses kann es zu allergischen Reaktionen kommen. In Zweifelsfällen einen Facharzt konsultieren. Sollten während der Abdruckabnahme allergische Reaktionen auftreten, die Behandlung sofort abbrechen und ärztliche Hilfe suchen.

Bei Verschlucken von Material sofort ärztliche Hilfe suchen.

Aufbewahrung

Das Produkt muss kühl und trocken, sowie fern von Hitzequellen aufbewahrt werden. Das auf die Verpackung aufgedruckte Verfallsdatum bezieht sich auf die original werksverpackte Packung. Auf jeder einzelnen Verpackung sind Losnummer und Verfallsdatum aufgeführt. Bei Mitteilungen sind diese beiden Angaben zu nennen, um das gesamte bezeichnete Los rasch und zweifelsfrei identifizieren zu können.

Wichtig: Das Erzeugnis nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

VERPACKUNG

Produkt Code 055112 - Set 1: 1 Kartusche à 380 ml + 5 Mischspitzen + 1 Feststellring

Produkt Code 055113 - Set 2: 2 Kartuschen à 380 ml + 10 Mischspitzen + 1 Feststellring

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A 50012 GRASSINA (FI) – ITALY Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697

E-mail : info@vanninidental.com www.vanninidental.com