



Produktdatenblatt Oberflächendesinfektion



pep sensitive® Wipes

2214GT

Produktbeschreibung

Als Medizinprodukt: Gebrauchsfertige Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

Als Biozidprodukt: Gebrauchsfertige Feuchttücher zur Desinfektion und Reinigung von kleineren Flächen.

Anwendungsbereich

Sehr gute Materialverträglichkeit auch gegenüber sonst alkoholunverträglichen Materialien wie Acrylglas oder Kunstleder. Geeignet für den medizinischen Bereich ((zahn)ärztliche Praxen, Kliniken, Altenheime, Pflege- und Rettungsdienste) und die Bereiche Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen.

Anwendung

Zur Desinfektion und Reinigung von Oberflächen, den Beutel mit den getränkten Tüchern oben öffnen und in den dafür vorgesehenen Entnahmebehälter stellen. Das Tuch in der Mitte der Vliesrolle anziehen und durch den Stern im Deckelverschluss fädeln. Den Deckel fest auf den Behälter drücken und dicht verschließen. Das Öffnungsdatum, Haltbarkeitsdatum, sowie die gesetzesrelevanten Hinweise der Tränkflüssigkeit sind zu beachten und auf ein Etikett zur äußeren Kennzeichnung des Behälters zu übertragen. Die zu desinfizierenden Flächen sorgfältig abwischen und einwirken lassen. Alle zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig benetzt sein. Die Tücher sind nach dem Öffnen des Beutels für 28 Tage in der Entnahmedose verwendbar. Die Aufbereitung des Entnahmebehälters ist gemäß der nebenstehenden Aufbereitungshinweise mit einem geeigneten Desinfektionstuch durchzuführen.

Vertrieb durch Peppler GmbH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen
Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06
www.peppler.de

Hersteller

PRISMAN GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18 • 64653 Lorsch
Tel.: +49 (0) 6251 866980-0

Wirkungsspektrum & Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Einwirkzeit
Oberflächendesinfektion mit Mechanik	
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (<i>C. albicans</i>) nach VAH/ EN 16615	5 min. (hohe Belastung)
Oberflächendesinfektion ohne Mechanik	
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (<i>C. albicans</i>) EN 13727, EN 1276, EN 13624, EN 1650, EN 13697	1 min. (hohe Belastung)
Tuberkulozid (<i>M. terrae</i>), mykobakterizid (<i>M. avium</i>) nach EN 14348	1 min. (hohe Belastung)
Begrenzt viruzid (HBV, HIV, HCV) nach EN 14476	1 min. (hohe Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS Noro-, Adeno- und Rotaviren nach EN 14476	1 min. (niedrige Belastung)
Polyoma SV40 nach RKI/ DVV	1 min. (mit Belastung)

Medizinproduktklasse

Ila

Biozidregistriernummer

N-81284

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zusammensetzung

100 ml Lösung enthalten:

20 g 1-Propanol

5 g 2-Propanol

Chemisch-physikalische Daten

Farbe farblos

Aussehen getränktes Tuch

pH-Wert (20°C) > 9,5

Vertrieb durch

Peppler GmbH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen

Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06

www.peppler.de

Hersteller

PRISMAN GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18 • 64653 Lorsch

Tel.: +49 (0) 6251 866980-0

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit ungeöffnet

3,5 Jahre ab Produktionsdatum

Haltbarkeit nach Anbruch

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Anforderungen an die Lagerumgebung

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

Produktsortiment & Spezifikation

Artikelnummer	Blattanzahl	Tuchgröße	Verpackungseinheit
2214GT	100	12 x 20 cm	12 Tuchrollen

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
2609L	Leerdose für Nachfüllpack
2419	Multimarker, schwarz mit Radierer, wasserfester Stift zur Beschriftung

Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften des zuständigen Bundeslandes erfolgen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere MedizinprodukteberaterInnen helfen Ihnen gerne weiter.

DE: 0641-95205-99

AT: 01-47017-06

E-Mail: info@peppler.de



Vertrieb durch

Peppler GmbH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen

Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06

www.peppler.de

Hersteller

PRISMAN GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18 • 64653 Lorsch

Tel.: +49 (0) 6251 866980-0