

Produktdatenblatt Oberflächendesinfektion

peppler.de

VAH
Verband für Angewandte Hygiene e.V.



Immix Clean®

906

Produktbeschreibung

Immix Clean® ist eine gebrauchsfertige, alkoholische, aldehydfreie Sprüh-/Wischdesinfektionslösung zur Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen von nichtinvasiven Medizinprodukten und Oberflächen.

Anwendungsbereich

Zur Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen von nichtinvasiven Medizinprodukten und Oberflächen im medizinischen Umfeld, Lebensmittelbereich, öffentlichen Einrichtungen und in der Industrie. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten.

Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig benetzen und ggf. mit einem sauberen Einmaltuch verteilen. Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit Fläche feucht halten. An schwer zugänglichen Stellen kann Immix Clean® mit der Pump- oder Sprühflasche aufgebracht werden. Bei Flächen und Arbeitsgeräten, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Vertrieb durch

Peppler GmbH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen

Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06

www.peppler.de

Hersteller

Laboratorium Dr. Deppe

Hooghe Weg 35 • 47906 Kempen

Tel.: +49 (0) 2152 5565-0

www.drdeppe.de

Wirkungsspektrum & Einwirkzeiten

| Wirksamkeit | Einwirkzeit |
|--|---|
| Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (<i>C. albicans</i>) nach EN 16615*, EN 13727, EN 13624 | 1 min. (hohe Belastung) (VAH: 5 min.) |
| Tuberkulozid (<i>M. terrae</i>) nach EN 14348 | 1 min. (hohe Belastung) |
| Viruswirksamkeit | |
| Begrenzt viruzid (BVDV) nach RKI/ DVV | 2 min. (in 10% FKS) |
| Begrenzt viruzid (MAV) nach RKI/ DVV | 30 sek. (in 10% FKS) |

* an Referenz Tuch getestet

Medizinproduktklasse

Ila

Biozidregistriernummer

N-78339

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zusammensetzung

100 ml Lösung enthalten:

9,15 ml 1-Propanol

47,90 ml Ethanol

Chemisch-physikalische Daten

| | |
|----------------|--------------------|
| Farbe | farblos |
| Aussehen | klar |
| Zustand | flüssig |
| pH-Wert (20°C) | 6,5 – 8,5 |
| Dichte (20°C) | 0,915 – 0,925 g/ml |

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit ungeöffnet

3 Jahre ab Produktionsdatum

Haltbarkeit nach Anbruch

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Vertrieb durch

Peppler GmbH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen

Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06

www.peppler.de

Hersteller

Laboratorium Dr. Deppe

Hooghe Weg 35 • 47906 Kempen

Tel.: +49 (0) 2152 5565-0

www.drdeppe.de

Anforderungen an die Lagerumgebung

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

Beachten Sie die nachfolgenden Temperaturgrenzen für die Lagerung.

| | |
|---|---------------------------|
| Temperaturgrenzen für kurzzeitige Lagerung (Min. - Max.) | 0 °C – 40 °C ¹ |
| Umgebungstemperatur für dauerhafte Lagerung gemäß Haltbarkeit (Min.- Max.) | 20 °C – 25 °C |

¹Eine kurzzeitige Lagerung (höchstens 24 h) bis maximal 40 °C hat keine Auswirkung auf die Wirksamkeit des Produkts.

Produktsortiment & Spezifikation

| Artikelnummer | Gebindegröße | Gebindeart | Verpackungs- einheit |
|---------------|--------------|------------|-------------------------|
| 906 | 10 L | Kanister | 1 x 10 L |
| 906A | 1 L | Flasche | 12 x 1 L |

Zubehör

| Artikelnummer | Beschreibung |
|---------------|-------------------------------|
| 002 | Auslaufhahn |
| 006 | Kanisterschlüssel |
| 900S | Sprühkopf für 1 L Flasche |
| 3406 | Dosierpumpe für 1 L Flasche |
| 3407 | Dosierpumpe für 10 L Kanister |
| 3409 | Kippaufsatz für 1 L Flasche |

Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften des zuständigen Bundeslandes erfolgen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere MedizinprodukteberaterInnen helfen Ihnen gerne weiter.

DE: 0641-95205-99

AT: 01-47017-06

E-Mail: info@peppler.de



Vertrieb durch

Peppler GmbH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen

Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06

www.peppler.de

Hersteller

Laboratorium Dr. Deppe

Hooghe Weg 35 • 47906 Kempen

Tel.: +49 (0) 2152 5565-0

www.drdeppe.de