

# Produktdatenblatt Oberflächendesinfektionstücher

peppler.de



## pep sensitive® XXL PET-Wipes

### Produktbeschreibung

**Als Biozidprodukt:** Gebrauchsfertige Feuchttücher zur Desinfektion und Reinigung von kleineren Flächen.

**Als Medizinprodukt:** Gebrauchsfertige Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

Sehr gute Materialverträglichkeit auch gegenüber sonst alkoholunverträglichen Materialien, wie z.B. Acrylglas, Kunstleder und Tablets.

### Anwendungsbereich

Geeignet für den medizinischen Bereich ((zahn)ärztliche Praxen, Kliniken, Altenheime, Pflege- und Rettungsdienste) und die Bereiche Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen.

### Anwendung

Das Stick- & Liftetikett vom Beutel abziehen und auf den Entnahmeeimer kleben. Das Öffnungs- und Haltbarkeitsdatum muss händisch auf dem dafür vorgesehenen Feld dokumentiert werden. Beutel oben öffnen und in den Entnahmeeimer stellen. Das erste Tuch der Vliesrolle anziehen und durch den Stern im Deckelverschluss fädeln. Den Deckel fest auf den Behälter drücken und dicht verschließen. Die zu desinfizierenden Flächen sorgfältig abwischen und einwirken lassen. Alle zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig benetzt sein. Behälter immer verschließen. Die Tücher sind nach dem Öffnen des Beutels für 28 Tage im Entnahmeeimer verwendbar. Die Aufbereitung des Entnahmeeimers ist gemäß der nebenstehenden Aufbereitungshinweise mit einem geeigneten Desinfektionstuch durchzuführen.

#### Vertrieb durch

**Peppler GmbH**

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen

Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06

www.peppler.de

#### Hersteller

**PRISMAN GmbH**

Otto-Hahn-Ring 6-18 • 64653 Lorsch

Tel.: +49 (0) 6251 866980-0

# pep sensitive® XXL PET-Wipes

## Wirkungsspektrum & Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Einwirkzeit
<b>Oberflächendesinfektion mit Mechanik</b>	
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid ( <i>C. albicans</i> ) nach VAH/ EN 16615	1 min. (hohe Belastung)
<b>Oberflächendesinfektion ohne Mechanik</b>	
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid ( <i>C. albicans</i> ) nach EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650, EN 13697	1 min. (hohe Belastung)
Tuberkulozid ( <i>M. terrae</i> ), mykobakterizid ( <i>M. avium</i> ) EN 13438	1 min. (hohe Belastung)
Begrenzt viruzid (HBV, HCV, HIV) nach EN 14476	1 min. (hohe Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren sowie Noro-, Adeno- und Rotaviren) nach EN 14476	1 min. (niedrige Belastung)
Polyomaviren (SV 40) nach RKI/DVV	1 min. (mit Belastung)

## Medizinproduktklasse

Ila

## Biozidregistriernummer

**N-81284**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**100 ml Lösung enthalten:**

20,0 g 1-Propanol

5,0 g 2-Propanol

## Chemisch-physikalische Daten

Farbe	farblos
Aussehen	getränktes Tuch
Zustand	flüssig
pH-Wert (20°C)	> 9,5

### Vertrieb durch

**Peppler GmbH**

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen

Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06

www.peppler.de

### Hersteller

**PRISMAN GmbH**

Otto-Hahn-Ring 6-18 • 64653 Lorsch

Tel.: +49 (0) 6251 866980-0

# pep sensitive® XXL PET-Wipes

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit ungeöffnet

3,5 Jahre ab Produktionsdatum

### Haltbarkeit nach Anbruch

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

## Anforderungen an die Lagerumgebung

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff. Beachten Sie die nachfolgenden Temperatur-grenzen für die Lagerung:

**Min. 0 °C bis max. 40 °C**

## Produktsortiment & Spezifikation

Artikelnummer	Tuchgröße	Blattanzahl	Verpackungs-einheit
2434PET	30 x 30 cm	70	6 Tuchrollen
2434PET-140	15 x 30 cm	140	6 Tuchrollen
2454	20 x 30 cm	150	6 Tuchrollen

## Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
2415	Dosiereimer für Tuchrollen (in 11 verschiedenen Designs) Durchmesser: 17 cm, Höhe: 15 cm
2419	Multimarker, schwarz mit Radierer, wasserfester Stift

## Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften des zuständigen Bundeslandes erfolgen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

**Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!**

Unsere MedizinprodukteberaterInnen helfen Ihnen gerne weiter.

DE: 0641-95205-99

AT: 01-47017-06

E-Mail: [info@peppler.de](mailto:info@peppler.de)



### Vertrieb durch

#### Peppler GmbH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen

Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06

[www.peppler.de](http://www.peppler.de)

### Hersteller

#### PRISMAN GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18 • 64653 Lorsch

Tel.: +49 (0) 6251 866980-0