


Produktdatenblatt/Gebrauchsanweisung

Vorgetränkte Desinfektionstücher

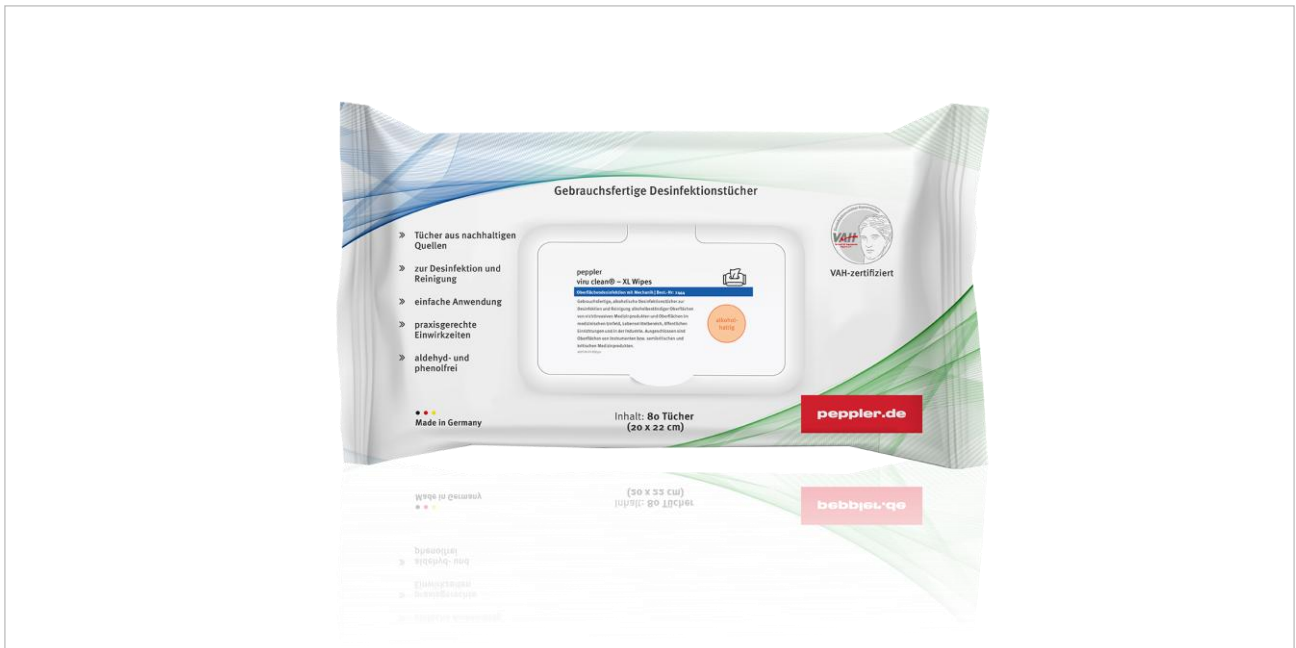

peppler viru clean® XL Wipes | 2444

| Produktbeschreibung

peppler viru clean® – XL Wipes sind gebrauchsfertige, alkoholische, aldehydfreie Desinfektionstücher. Die cellulosischen Tücher bestehen aus 100 % nachhaltigen Quellen mit optimaler Wirkstoffabgabe.

| Anwendungsbereich

Zur Desinfektion und Reinigung alkoholbeständiger Oberflächen von nichtinvasiven Medizinprodukten und Oberflächen im medizinischen Umfeld, Lebensmittelbereich, öffentlichen Einrichtungen und in der Industrie. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten. Da es sich um ein alkoholisches Desinfektionsmittel handelt, ist die Anwendung für alkoholunbeständige Oberflächen, wie Acrylglas oder Polycarbonat, aber auch Aluminium nicht zu empfehlen.

| Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit Fläche feucht halten. Bei Flächen und Arbeitsgeräten die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen.

Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de

| Wirkspektrum & Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Einwirkzeit
Oberflächendesinfektion MIT Mechanik	
Bakterizid, levurozid nach EN 13727, EN 13624, EN 16615*	1 min. (hohe Belastung)
Oberflächendesinfektion OHNE Mechanik	
Fungizid (<i>C. albicans</i> , <i>A. brasiliensis</i>) nach EN 13624	5 min. (hohe Belastung)
Tuberkulozid/ Mykobakterizid (<i>M. terrae</i> , <i>M. avium</i>) nach EN 14348	1 min. (hohe Belastung)
Begrenzt viruzid (Vaccinia Elstree, BVDV Stamm NADL) nach RKI/ DVV	1 min. (in 10 % FKS)
Begrenzt viruzid PLUS (Murines Norovirus, Adenovirus Typ5) nach RKI/ DVV	1 min. (in 10 % FKS)
Viruzid Polyomavirus SV40 nach RKI/ DVV	1 min. (in 10 % FKS)
Viruzid (Murines Norovirus, Adenovirus Typ5, Poliovirus Typ 1) nach EN 14476	5 min. (niedrige Belastung)

* an Referenz Tuch getestet

| Zusammensetzung

In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:

63,5 g Ethanol

0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

| Dual-Use Produkt

Medizinproduktklasse	Biozidregistriernummer
Ila	N-115377 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de

| Lagerung & Haltbarkeit

Haltbarkeit ungeöffnet | 3 Jahre ab Produktionsdatum

Haltbarkeit nach Anbruch | 28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

| Produktsortiment & Spezifikation

Artikelnummer	Tuchgröße	Blattanzahl	Verpackungseinheit
2444	20 x 22 cm	80 Tücher	6 Flowpacks

| Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
-	-

| Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere MedizinprodukteberaterInnen helfen Ihnen gerne weiter.

Telefon:

DE: 0641 95205-99

AT: 01 47017-06

CH: 044 688 04-81

E-Mail:

info@peppler.de

info@peppler.at

info@peppler-swiss.ch



Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de