

peppler.de

VAH
Verband für Angewandte Hygiene e.V.

Produktdatenblatt Oberflächendesinfektionstücher



pep sensitive® - Premium Wipes

Produktbeschreibung

Als Biozidprodukt: Gebrauchsfertige Feuchttücher zur Desinfektion und Reinigung von kleineren Flächen.

Als Medizinprodukt: Gebrauchsfertige Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

Sehr gute Materialverträglichkeit auch gegenüber sonst alkoholunverträglichen Materialien, wie z.B. Acrylglas, Kunstleder und Tablets.

Anwendungsbereich

Geeignet für den medizinischen Bereich ((zahn)ärztliche Praxen, Kliniken, Altenheime, Pflege- und Rettungsdienste) und die Bereiche Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen.

Anwendung

XXL-Tuchrolle: Das Stick- & Liftetikett vom Beutel abziehen und auf den Entnahmeeimer kleben. Das Öffnungs- und Haltbarkeitsdatum muss händisch auf dem dafür vorgesehenen Feld dokumentiert werden. Beutel oben öffnen und in den Entnahmeeimer stellen. Das erste Tuch der Vliesrolle anziehen und durch den Stern im Deckelverschluss fädeln. Den Deckel fest auf den Behälter drücken und dicht verschließen.

Flowpack: Den wiederverschließbaren Spenderbeutel oben öffnen und ein getränktes Tuch entnehmen. Danach den Beutel sofort wieder dicht verschließen. Das Öffnungs- und Haltbarkeitsdatum muss vor dem ersten Öffnen des Beutels händisch auf der Plakette bzw. dem dafür vorgesehenen Feld dokumentiert werden.

Die zu desinfizierenden Flächen sorgfältig abwischen und einwirken lassen. Alle zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig benetzt sein. Behälter immer verschließen. Die Tücher sind nach dem Öffnen des Beutels für 28 Tage im Entnahmeeimer verwendbar. Die Aufbereitung des Entnahmeeimers ist gemäß der nebenstehenden Aufbereitungshinweise mit einem geeigneten Desinfektionstuch durchzuführen.

Vertrieb durch

Peppler GmbH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen

Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06

www.peppler.de

Hersteller

PRISMAN GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18 • 64653 Lorsch

Tel.: +49 (0) 6251 866980-0

pep sensitive® -Premium Wipes

Wirkungsspektrum & Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Einwirkzeit
Oberflächendesinfektion mit Mechanik	
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (<i>C. albicans</i>) nach VAH/ EN 16615	1 min. (hohe Belastung)
Oberflächendesinfektion ohne Mechanik	
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (<i>C. albicans</i>) nach EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650, EN 13697	1 min. (hohe Belastung)
Tuberkulozid (<i>M. terrae</i>), mykobakterizid (<i>M. avium</i>) EN 13438	1 min. (hohe Belastung)
Begrenzt viruzid (HBV, HCV, HIV) nach EN 14476	1 min. (hohe Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren sowie Noro-, Adeno- und Rotaviren) nach EN 14476	1 min. (niedrige Belastung)
Polyomaviren (SV 40) nach RKI/DVV	1 min. (mit Belastung)

Medizinproduktklasse

IIa

Biozidregistriernummer

N-81707

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zusammensetzung

100 ml Lösung enthalten:

20,0 g 1- Propanol

5,0 g 2-Propanol

Chemisch-physikalische Daten

Farbe	farblos
Aussehen	getränktes Tuch
Zustand	flüssig
pH-Wert (20°C)	> 9,5

Vertrieb durch

Peppler GmbH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen

Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06

www.peppler.de

Hersteller

PRISMAN GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18 • 64653 Lorsch

Tel.: +49 (0) 6251 866980-0

pep sensitive® -Premium Wipes

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit ungeöffnet

3,5 Jahre ab Produktionsdatum

Haltbarkeit nach Anbruch

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Anforderungen an die Lagerumgebung

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff. Beachten Sie die nachfolgenden Temperatur-grenzen für die Lagerung:

Min. 0 °C bis max. 40 °C

Produktsortiment & Spezifikation

Artikelnummer	Tuchgröße	Blattanzahl	Verpackungs-einheit
2434 (versch. Dufrichtungen)	30 x 30 cm	70	6 Tuchrollen
2434-140 (versch. Dufrichtungen)	15 x 30 cm	140	6 Tuchrollen
2464 (versch. Dufrichtungen)	20 x 22 cm	80	24 Flowpacks

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
2415	Dosiereimer für Tuchrollen (in 11 verschiedenen Designs) Durchmesser: 17 cm, Höhe: 15 cm
2419	Multimarker, schwarz mit Radierer, wasserfester Stift

Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften des zuständigen Bundeslandes erfolgen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere MedizinprodukteberaterInnen helfen Ihnen gerne weiter.

DE: 0641-95205-99

AT: 01-47017-06

E-Mail: info@peppler.de



Vertrieb durch

Peppler GmbH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen

Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06

www.peppler.de

Hersteller

PRISMAN GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18 • 64653 Lorsch

Tel.: +49 (0) 6251 866980-0