


peppler.de

Produktdatenblatt/Gebrauchsanweisung Medizinische Einmalhandschuhe

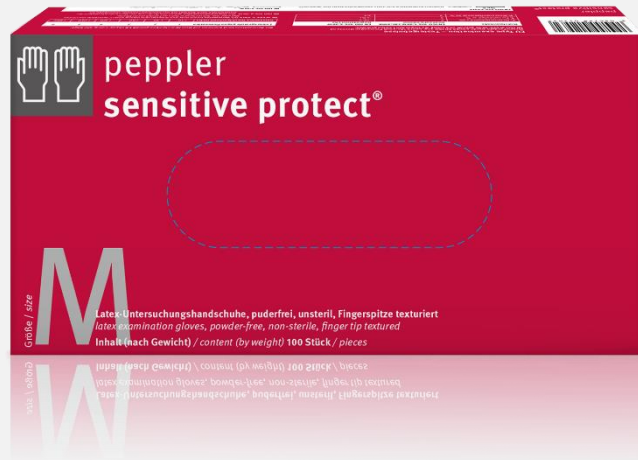

peppler sensitive protect®

202A

Produktbeschreibung

Medizinischer Einmalschutzhandschuh aus Latex:

naturweiß, chloriniert, polymer beschichtet, thiuramfrei, puderfrei, Rollrand, texturierte Fingerspitzen.



Dieses Produkt enthält Naturlatex,
welches unter Umständen allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Verwendungszweck

Gem. Verordnung (EU) 2017/745: Medizinprodukt der Klasse I



Untersuchungshandschuhe aus Latex,
puderfrei, nicht steril, beidhändig tragbar.

Gem. Verordnung (EU) 2016/425: PSA Kat. III



Einmalschutzhandschuhe
(zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Gefährdung)

Normen

DIN EN ISO 21420, DIN EN 455, DIN EN ISO 374, DIN EN 16523, ISO 16604

Information und Kennzeichnung



Siehe Spenderbox und Zusatzinformationen

VERTRIEB DURCH

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

TELEFON

DE: 0641-952 05-99
AT: 01-470 17 06

WEB

www.peppler.de
www.peppler.at

Testergebnisse

Proteingehalt	< 50 µg/g
AQL	1.5
Chemikalienbeständigkeit	Typ B
Reißkraft	min 6 N
Lebensmittelkontakt	geprüft
Dermatest®	sehr gut



Gewicht und Wanddicke

Größe M (7-8): median 5.9 g ± 0.2 g

Handfläche: median 0.08 mm ± 0.03 mm

Abmessungen (Handschuhbreite) und erhältliche Größen

XS	5-6	≤ 80mm
S	6-7	80 mm ± 10 mm
M	7-8	95 mm ± 10 mm
L	8-9	110 mm ± 10 mm
XL	9-10	≥ 110 mm

Handschuhlänge ≥ 240 mm

Lagerung

Kühl und trocken in der Originalverpackung lagern, keine übermäßige Hitze und Sonneneinstrahlung.

Lagerung bei 10-30°C.



Inhalt pro Spenderbox und Transportkarton (nach Gewicht)

Größen XS-L: 100 Stück pro Spenderbox

Größe XL: 90 Stück pro Spenderbox

10 Spenderboxen pro Transportkarton

Herstellungsland und Haltbarkeit ab Herstellungsdatum

Thailand

3 Jahre

Entsorgungshinweis



Entsprechend den gültigen Vorschriften für das Handschuhmaterial entsorgen. Verunreinigte Handschuhe den örtlichen Vorschriften folgend für die entsprechende Substanz entsorgen.

VERTRIEB DURCH

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

TELEFON

DE: 0641-952 05-99
AT: 01-470 17 06

WEB

www.peppler.de
www.peppler.at

Zusatzinformationen

Dieses Produkt wurde gemäß **EN ISO 374-1:2016+A1:2018** und **EN 21420:2020** geprüft und erfüllt die folgenden **Leistungsstufen**:

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Permeationslevel	EN 374-4:2019 Degradation (%)
K: Natriumhydroxid 40%	6	-18,2
T: Formaldehyd 37%	5	-28,1
P: Wasserstoffperoxid 30%	3	3,3

EN ISO 374-1:2016
Typ B



Typ B:

Die Permeationsleistung muss mindestens Stufe 2 gegen wenigstens drei Prüfchemikalien entsprechen.

Die Permeationslevel basieren auf Durchbruchzeiten gemäß **EN 16523-1:2015** wie folgt:

Leistungsstufe gegen Permeation	1	2	3	4	5	6
Gemessene Durchbruchzeit (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN ISO 374-4:2019:

Die Degradationsstufen geben die Änderung der Durchstichfestigkeit der Handschuhe nach Kontakt mit der beanspruchenden Chemikalie an.

EN 16523-1:2015:

Die Permeation beschreibt den Bewegungsvorgang einer Chemikalie durch das Material des Schutzhandschuhs auf molekularer Ebene.

EN ISO 374-5:2016



Geprüft auf Widerstand gegen Penetration gemäß EN ISO 374-2:2019

Widerstand gegen Bakterien und Pilze: **bestanden**

Widerstand gegen Viren gem. ISO 16604:2004: **bestanden**

Die Penetration wurde unter Laborbedingungen bewertet und bezieht sich nur auf die geprüften Proben.

VERTRIEB DURCH

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

TELEFON

DE: 0641-952 05-99
AT: 01-470 17 06

WEB

www.peppler.de
www.peppler.at

Information und Achtung

Enthält Restchemikalien, die allergische Reaktionen hervorrufen können.

Enthält Dithiocarbamate – bei Unverträglichkeit dagegen nicht verwenden.

Dieses Produkt enthält Naturlatex und kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen.

Diese Information macht keine Angaben zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Unterscheidung von Gemischen und reinen Chemikalien.

Der Widerstand gegen Chemikalien wurde unter Laborbedingungen an Proben beurteilt, die lediglich von der Handinnenfläche entnommen wurden und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Chemikalien. Er kann anders sein, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird.

Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können.

Wurden Schutzhandschuhe bereits verwendet, können sie aufgrund von Veränderungen ihrer physikalischen Eigenschaften geringeren Widerstand gegen gefährliche Chemikalien bieten.

Durch bei Berührung mit Chemikalien verursachte Degradation, Bewegungen, Fadenziehen, Reibung usw. kann die tatsächliche Anwendungszeit wesentlich reduziert werden.

Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von gegen Chemikalien beständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist.

Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler oder Mängel zu überprüfen.



Nur für die einmalige Verwendung bestimmt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere MedizinprodukteberaterInnen helfen Ihnen gerne weiter.

DE: 0641-95205-99

AT: 01-47017-06

E-Mail: info@peppler.de



peppler.de

VERTRIEB DURCH

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

TELEFON

DE: 0641-952 05-99
AT: 01-470 17 06

WEB

www.peppler.de
www.peppler.at