

Produktdatenblatt/Gebrauchsanweisung

Oberflächendesinfektion



Pepp Print | 28550

| Produktbeschreibung

Alkoholfreies, gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel (ohne Mechanik) für die Desinfektion von Oberflächen dentaler Abformungen.

Anwendungsbereich

Geeignet für die Desinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten und Oberflächen im medizinischen Umfeld, insbesondere für die Desinfektion ohne Mechanik von Oberflächen dentaler Abformungen.

Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten.

| Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig benetzen und ggf. mit einem sauberen Einmaltuch verteilen. Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit Fläche feucht halten. Bei Flächen und Arbeitsgeräten die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen.

Sprühdesinfektion:

Sprühen Sie die gebrauchsfertige Lösung aus ca. 30 cm Entfernung auf die gesamte zu desinfizierende

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

peppler.de

Oberfläche auf. Auf vollständige Benetzung achten. Halten Sie die Oberfläche während der gesamten Einwirkzeit feucht, ggf. erneut mit der Gebrauchslösung einsprühen.

Tauchdesinfektion:

Tauchen die die Abformung/ den Abdruck mindestens 10 sek. in Pepp Print ein. Beachten Sie dass das gesamte Modell eingetaucht werden muss. Bewegen Sie die Abformung leicht in der Lösung um Hohlräume vollständig zu benetzen. Entnehmen Sie die Abformung aus dem Tauchbad und lassen Sie Pepp Print für 1 min. einwirken. Halten Sie die Oberfläche während der gesamten Einwirkzeit feucht, ggf. erneut in Pepp Print eintauchen.

Spülen Sie die Abformung anschließend vorsichtig und sorgfältig mit Leitungswasser ab.

| Wirkspektrum & Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Einwirkzeit
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (<i>C. albicans</i>) nach EN 13727, EN 13624, EN 13692	1 min. (hohe Belastung)
Tuberkulozid (<i>M. terrae</i>) nach EN 13697	60 min. * (hohe Belastung)
Begrenzt viruzid (MVA) nach EN 14476	1 min. (hohe Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS nach EN 14476	60 min. * (niedrige Belastung)

* nicht für patientennahe Oberflächen

| Zusammensetzung

In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:

0,1 g 2-Phenoxyethanol

0,35 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid

0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan

| Medizinproduktklasse

IIa

| Lagerung & Haltbarkeit

Haltbarkeit ungeöffnet | 3 Jahre ab Produktionsdatum

Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de

Haltbarkeit nach Anbruch | 12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff. Beachten Sie die nachfolgenden Temperaturgrenzen für die Lagerung.

Temperaturgrenzen für kurzzeitige Lagerung (Min. - Max.)	0 °C – 40 °C ¹
Umgebungstemperatur für dauerhafte Lagerung gemäß Haltbarkeit (Min.- Max.)	20 °C – 25 °C

¹Eine kurzzeitige Lagerung (höchstens 24 h) bis maximal 40 °C hat keine Auswirkung auf die Wirksamkeit des Produkts.

| Produktsortiment & Spezifikation

Artikelnummer	Gebindegröße	Gebindeart	Verpackungseinheit
28550	5 L	Kanister	1 x 5 L
28550A	1 L	Flasche	1 x 1 L

| Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
002	Auslaufhahn
006	Kanisterschlüssel
3407	Dosierpumpe für 5 L Kanister
900S	Sprühkopf

| Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere MedizinprodukteberaterInnen helfen Ihnen gerne weiter.

Telefon:

DE: 0641 95205-99

AT: 01 47017-06

CH: 044 688 04-81

E-Mail:

info@peppler.de

info@peppler.at

info@peppler-swiss.ch



Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de