

peppler.de

Informationsblatt Additionssilikone (A-Silikone)



Information für die A-Silikone

Additionssilikon für den Erstabdruck: Prestige Putty Soft

Additionssilikon für den Korrekturabdruck: Prestige Bite Cad/Cam, Prestige Light, Prestige Regular, Prestige Hydrolight

Bei der Verwendung von Additionssilikon für den Erstabdruck (z.B. Prestige Putty Soft) muss zwingend darauf geachtet werden weder die Messbecher, die Deckel, noch die Schutzfolien von Basis und Härter zu vertauschen, da die Dämpfe des Härters, auch wenn er nur in der Nähe der Basis steht, diese teilweise zum Vulkanisieren bringt und sie somit härten würde.

Es ist wichtig, dass bei jeder Verwendung des Produkts der **farbige Messbecher für die Basis** und der **weiße Messbecher für den Härter** verwendet wird.

Tragen Sie beim Mischen von Additionssilikon **keine** Latexhandschuhe!

Die bei der Herstellung von Latexhandschuhen verwendeten Schwefelverbindungen hemmen den platinbasierten Silikonkatalysator. Zum Mischen wird das Tragen von Nitrilhandschuhen empfohlen.

Bei der ersten Verwendung einer Silikonkartusche für den Korrekturabdruck wird empfohlen, vor dem Befüllen des Abformlöffels eine kleine Menge des Materials auf ein Mixing Pad zu gießen, um sicherzustellen, dass Basis und Härter perfekt durchmischt sind.

Eines der wichtigsten Merkmale von Prestige Bite Cad/Cam ist, dass es im Gegensatz zu anderen auf dem Markt befindlichen Additionssilikon für die okklusale Registrierung die technische Eigenschaft besitzt, sowohl mit konventionellen als auch mit Cad/Cam-Systemen gelesen werden zu können.

Alle genannten Additionssilikon dürfen bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum verwendet werden, auch wenn es bereits geöffnet wurde.

Vertrieb durch
Pepler GmbH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen
Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06
www.pepler.de

Hersteller

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A- 50012 • GRASSINA (FI) ITALY
Tel. +39055/644698 • Fax +39055/644697
info@vanninidental.com
www.vanninidental.com