

## Produktdatenblatt PROPHYPEP

#NEU



PROPHYPEP Clean

# PROPHYPEP

## Allgemeine Hinweise

PROPHYPEPClean ist eine Prophylaxepaste für die professionelle Zahnreinigung und Prophylaxe mit angenehmen Geschmack.

Spezielle Korngeometrien sorgen für eine effiziente und gleichzeitig schonende Abrasion. PROPHYPEPClean hat eine optimierte Thixotropie für eine perfekte Applikation und Anwendung, wodurch auch bei der Lagerung keine Separierung der Paste erfolgt.

## Anwendungsbereiche / Indikation

Die Paste PROPHYPEPClean wird in der professionellen Zahnreinigung sowie in der Prophylaxe eingesetzt und entfernt sehr wirksam Zahnbeläge und Verfärbungen in einem Zahnschmelz schonenden Verfahren. Die Partikel erzielen dabei gleichzeitig eine sehr effektive Reinigungsleistung als auch beste Polierergebnisse.

## Hinweise zur Anwendung

Die Prophylaxepaste PROPHYPEPClean auf eine Polierbürste aufbringen. Die Dosierung von einer kirschkerngroßen Menge reicht für eine Zahngruppe von ca. 2-3 Zähnen. Sollten sich auf der Zahnoberfläche noch Rückstände befinden, diese mit einer frischen Menge der Prophylaxepaste PROPHYPEPClean behandeln.

Um verspritzen des Materials und Hitze einwirkung zu vermeiden, sollte bei niedriger Drehzahl mit einem Nylonborstenpolierer gearbeitet werden (ca. 3000 U/min.).

Bei Patienten mit freiliegendem Dentin wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

Zuerst die Zahnschmelzbereiche mit einer frischen Menge PROPHYPEPClean behandeln und anschließend die Dentinbereiche.

## Hersteller

PRISMAN GmbH  
Otto-Hahn-Ring 6-18  
D - 64653 Lorsch  
Tel.: 06251/866 980-0



## Chemisch-physikalische Daten

**Optik:** Pastell-blau, -grün, -gelb oder -rosa  
je nach RDA-Wert

**Viskosität:** thixotrope Paste mit dispergierten abrasiven Partikeln zur Anwendung im Dentalbereich.

## PROPHYPEPClean

RDA 40	mittlere Korngröße 8µ
RDA120	mittlere Korngröße 15µ
RDA 170	mittlere Korngröße 75µ
RDA 250	mittlere Korngröße 75µ-125µ

## Lieferformen

PROPHYPEPClean RDA 40 (Art.Nr: 81040)  
PROPHYPEPClean RDA 120 (Art.Nr: 81120)  
PROPHYPEPClean RDA 170 (Art.Nr: 81170)  
PROPHYPEPClean RDA 250 (Art.Nr: 81250)

100ml Tube mit Flip-Flop-Verschluss für einfache Einhandbedienung.

MP Klasse I