

peppler.de



Produktdatenblatt Oberflächendesinfektion



pep sensitive®

914

Produktbeschreibung

Als Medizinprodukt: Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

Als Biozidprodukt: Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur Desinfektion von kleineren Flächen.

Anwendungsbereich

Geeignet für den medizinischen Bereich, (zahn)ärztliche Praxen, Kliniken, Altenheime, Pflege- und Rettungsdienste und die Bereiche Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen. Besonders geeignet zur Anwendung auf alkoholempfindlichen Flächen wie Kunstleder oder Acrylglas.

Anwendung

Zur Wischdesinfektion ein geeignetes Tuch mit der Desinfektionslösung sehr gut benetzen und die Flächen abwischen, bzw. die Lösung direkt auf die Fläche geben und danach wischen. Alle zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig feucht und benetzt sein. Das Präparat gemäß angegebener Einwirkzeiten einwirken lassen. Auch zum Tränken von kompatiblen und mit der Wischdesinfektion geprüften Tücherrollen geeignet. Es ist in diesem Anwendungsfall die geforderte Tränkmenge des jeweiligen Tuchmaterials zu beachten. Nur für den professionellen Gebrauch.

Vertrieb durch

Peppler GmbH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen
Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06
www.peppler.de

Hersteller

PRISMAN GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18 • 64653 Lorsch
Tel.: +49 (0) 6251 866980-0

Wirkungsspektrum & Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Einwirkzeit
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (<i>C. albicans</i>) nach EN 13727, EN 1276, EN 13624, EN 1650, EN 13697	1 min. (hohe Belastung)
Tuberkulozid (<i>M. terrae</i>), mykobakterizid (<i>M. avium</i>) nach EN 14348	1 min. (hohe Belastung)
Viruswirksamkeit	
Begrenzt viruzid (HBV, HIV, HCV) nach EN 14476	1 min. (hohe Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS Adeno-, Noro- und Rotaviren nach EN 14476	1 min. (geringe Belastung)
Polyomavirus SV40 nach RKI/ DVV	1 min. (mit Belastung)
VAH-Liste	
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (<i>C. albicans</i>), mit Mechanik nach VAH, 4-Feldertest (EN 16615)	5 min. (hohe Belastung)

Medizinproduktklasse

Ila

Biozidregistriernummer

N-81284

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zusammensetzung

100 ml Lösung enthalten:

20 g 1-Propanol

5 g 2-Propanol

Chemisch-physikalische Daten

Farbe farblos

Aussehen klar

Zustand flüssig

Dichte (20°C) 0,95 g/ml

Vertrieb durch

Peppler GmbH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen

Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06

www.peppler.de

Hersteller

PRISMAN GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18 • 64653 Lorsch

Tel.: +49 (0) 6251 866980-0

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit ungeöffnet

3,5 Jahre ab Produktionsdatum

Haltbarkeit nach Anbruch

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Produktsortiment & Spezifikation

Artikelnummer	Gebindegröße	Gebindeart	Verpackungs- einheit
914	5 L	Kanister	1 x 5 L

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
002	Auslaufhahn
006	Kanisterschlüssel
3407	Dosierpumpe

Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften des zuständigen Bundeslandes erfolgen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere MedizinprodukteberaterInnen helfen Ihnen gerne weiter.

DE: 0641-95205-99

AT: 01-47017-06

E-Mail: info@peppler.de



peppler.de

Vertrieb durch

Peppler GmbH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen

Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06

www.peppler.de

Hersteller

PRISMAN GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18 • 64653 Lorsch

Tel.: +49 (0) 6251 866980-0