

Produktdatenblatt/Gebrauchsanweisung gebrauchsfertige Desinfektionstücher



Micro Clean® GT | 2210GT/ 2430GT / 2430GT-140

| Produktbeschreibung

Micro Clean® GT – Wipes sind gebrauchsfertige, alkoholhaltige Desinfektionstücher zur Oberflächendesinfektion und -reinigung mit Mechanik. Die Tücher bestehen aus Polypropylen Material.

| Anwendungsbereich

Micro Clean® GT – Wipes eignen zur professionellen Oberflächendesinfektion und -reinigung mit Mechanik. Nicht geeignet für die Desinfektion semikritischer und kritischer Medizinprodukte.

| Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Die Menge, die auf die Oberfläche aufgebracht werden muss, ist abhängig von Oberflächenbeschaffenheit, Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchte. Im Lebensmittelbereich die Flächen abschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität behandeln. Gegebenenfalls die Flächen mit einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen.

Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de

Micro Clean® GT | 2210GT / 2430GT / 2430GT-140

| Wirkspektrum & Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Einwirkzeit
Oberflächendesinfektion MIT Mechanik	
Bakterizid, levurozid nach VAH / EN 16615	1 min. (hohe Belastung)
Begrenzt viruzid nach modified EN 16615	30 sek. (niedrige Belastung)

| Zusammensetzung

In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:

36,0 g Ethanol

0,075 g Didecyldimethylammoniumchlorid

| Dual-Use Produkt

Medizinproduktklasse	Biozidregistriernummer
Ila	2210GT: N-78079 2430GT: N-78078 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

| Lagerung & Haltbarkeit

Haltbarkeit ungeöffnet | 4 Jahre ab Produktionsdatum

Haltbarkeit nach Anbruch | 28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de

Micro Clean® GT | 2210GT / 2430GT / 2430GT-140

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff. Beachten Sie die nachfolgenden Temperaturgrenzen für die Lagerung.

Temperaturgrenzen für kurzzeitige Lagerung (Min. - Max.)	0 °C – 40 °C ¹
Umgebungstemperatur für dauerhafte Lagerung gemäß Haltbarkeit (Min.- Max.)	20 °C – 25 °C

¹Eine kurzzeitige Lagerung (höchstens 24 h) bis maximal 40 °C hat keine Auswirkung auf die Wirksamkeit des Produkts.

| Produktsortiment & Spezifikation

Artikelnummer	Gebindegröße	Gebindeart	Verpackungseinheit
2210GT	150 Blatt á 15 x 18 cm	Tuchrolle	12 Rollen
2210GTCITRO	150 Blatt á 15 x 18 cm	Tuchrolle	12 Rollen
2210GTEXTRA	150 Blatt á 15 x 18 cm	Tuchrolle	12 Rollen
2210GTMELON	150 Blatt á 15 x 18 cm	Tuchrolle	12 Rollen
2430GT	70 Blatt á 30 x 30 cm	Tuchrolle	6 Rollen
2430GT-140	140 Blatt á 15 x 30 cm	Tuchrolle	6 Rollen
2430GTCITRO	70 Blatt á 30 x 30 cm	Tuchrolle	6 Rollen
2430GT-140CITRO	140 Blatt á 15 x 30 cm	Tuchrolle	6 Rollen
2430GTEXTRA	70 Blatt á 30 x 30 cm	Tuchrolle	6 Rollen
2430GT-140EXTRA	140 Blatt á 15 x 30 cm	Tuchrolle	6 Rollen
2430GTMELON	70 Blatt á 30 x 30 cm	Tuchrolle	6 Rollen
2430GT-140MELON	140 Blatt á 15 x 30 cm	Tuchrolle	6 Rollen
2430GTSPORT	70 Blatt á 30 x 30 cm	Tuchrolle	6 Rollen
2430GT-140SPORT	140 Blatt á 15 x 30 cm	Tuchrolle	6 Rollen

Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de

Micro Clean® GT | 2210GT / 2430GT / 2430GT-140

| Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
2415	Leereimer für 2430GT/ 2430GT-140 in 11 verschiedene Designs
2608L	Leerdose für 2210GT

| Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere Medizinprodukteberater*Innen helfen Ihnen gerne weiter.

Telefon:**DE: 0641 95205-99****AT: 01 47017-06****CH: 044 688 04-81****E-Mail:**info@peppler.deinfo@peppler.atinfo@peppler-swiss.ch**Vertrieb durch**

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de