

# Produktdatenblatt Vorgetränkte Tücher

Stand: 2021-11-03

peppler.de



- ✓ Gebrauchsfertige alkoholische Desinfektionstücher
- ✓ Frei von Aldehyden und QAVs
- ✓ VAH-zertifiziert
- ✓ **Begrenzt viruzid PLUS**
- ✓ Sehr gute Materialverträglichkeit
- ✓ Tuchkombination biologisch abbaubar
- ✓ Duftvarianten: neutral, melon, sport

## peseptan e – XXL BioWipes

CE 0044

### Produktbeschreibung

peseptan e – XXL BioWipes sind gebrauchsfertige, alkoholische Oberflächendesinfektionstücher. Die Tücher bestehen aus 100% biologisch-abbaubarem Tuchmaterial mit optimaler Wirkstoffabgabe.

### Anwendungsbereich

peseptan e – XXL BioWipes eignen sich zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten. Für alkoholunbeständige Flächen, wie Acrylglas und Polycarbonat, ist die Anwendung nicht zu empfehlen.

### Anwendung

Die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände sorgfältig mit dem getränkten Desinfektionstuch abwischen. Dabei ist auf eine vollständige Benetzung zu achten. Während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Die Menge, die auf die Oberfläche aufgebracht werden muss, ist abhängig von Oberflächenbeschaffenheit, Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchte.

Die Tränklösung trocknet rückstandsfrei ab. Im Lebensmittelbereich die Flächen abschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität behandeln. Gegebenenfalls die Flächen mit einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Wirksamkeit	Einwirkzeit
<b>Tuch</b>	
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid ( <i>C. albicans</i> ) nach VAH, 4-Feldertest (EN 16615)	5 min. (geringe Belastung)
<b>Tränklösung</b>	
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid ( <i>C. albicans</i> ) nach EN 13727, EN 13624	1 min. (geringe Belastung)
Tuberkulozid ( <i>M. terrae</i> ) nach EN 14348	1 min. (geringe Belastung)
<b>Viruswirksamkeit</b>	
Begrenzt viruzid Vaccinia (MAV) nach EN 14476, Virus-4-Feldertest	1 min. (geringe Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS Adeno-, Noro- und Rotaviren nach EN 14476	1 min. (geringe Belastung)

#### VERTRIEB DURCH PEPPLER GMBH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen  
Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06  
www.peppler.de/ www.peppler-shopwelten.de

#### HERSTELLER LABORATORIUM DR. DEPPE

Hooghe Weg 35 • 47906 Kempen  
Tel.: +49 (0) 2152 5565-0  
www.drdeppe.de

# peseptan e – XXL BioWipes

## Medizinproduktklasse

Ila

## Biozidregistriernummer

N-77000 (XXL)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

**100 ml Tränklösung enthalten:**

50,00 ml Ethanol

## Chemisch-physikalische Daten

Farbe	farblos
Aussehen	getränktes Tuch
Zustand	flüssig
pH-Wert (20°C)	7 - 9
Dichte (20°C)	0,91 – 0,925 g/ml

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

Flowpack 24 Monate

Eimer und Nachfüllpack 36 Monate

### Haltbarkeit nach Anbruch

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Nur feuchte Tücher verwenden.

## Anforderungen an die Lagerungs- umgebung

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

Beachten Sie die nachfolgenden Temperaturgrenzen für die Lagerung.

Temperaturgrenzen für kurzzeitige Lagerung (Min. - Max.)	0 – 40 °C
Umgebungstemperatur für dauerhafte Lagerung gemäß Haltbarkeit (Min.- Max.)	20 – 25 °C

## Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften des zuständigen Bundeslandes erfolgen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt.

## Produktsortiment & Spezifikation

Artikelnummer	Gebindegröße	Gebindeart	Verpackungseinheit
2435	70 Tücher 30 x 30 cm	Nachfüllpack	6 x 70 Tücher
2435-140	140 Tücher 15 x 30 cm	Nachfüllpack	6 x 140 Tücher
2455	70 Tücher 30 x 30 cm	Nachfüllpack	6 x 70 Tücher
2455-140	140 Tücher 15 x 30 cm	Nachfüllpack	6 x 140 Tücher
2445	48 Tücher 30 x 30 cm	Flowpack	10 x 48 Tücher

## Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
2415	Dosiereimer rund (3,4 L, Durchmesser: 17 cm, Höhe: 15 cm)
2415EF	6 Universaletiketten für vorgetränkte Tücher
2419	Multimarker, schwarz mit Radierer, wasserfester Stift zur Beschriftung

## VERTRIEB DURCH

### PEPLER GMBH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen  
Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06  
www.pepler.de/ www.pepler-shopwelten.de

## HERSTELLER

### LABORATORIUM DR. DEPPE

Hooghe Weg 35 • 47906 Kempen  
Tel.: +49 (0) 2152 5565-0  
www.drdeppe.de