

Produktdatenblatt Vorgetränkte Tücher

Stand: 2021-11-22

peppler.de



- ✓ Gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- ✓ VAH-zertifiziert
- ✓ **Begrenzt viruzid**
- ✓ Sehr gute Materialverträglichkeit
- ✓ Tuchmaterial biologisch abbaubar
- ✓ Duftrichtungen: Cotton, Extra, Melon, Sport, Sunrise

Micro Clean ECO – BioWipes

CE 0044

Art-Nr.: 2433/ 2433-140/ 2443

Produktbeschreibung

Micro Clean ECO – BioWipes sind gebrauchsfertige aldehydfreie Desinfektionstücher. Die Tücher bestehen aus 100% biologisch abbaubarem Tuchmaterial mit optimaler Wirkstoffabgabe.

Anwendungsbereich

Micro Clean ECO – BioWipes eignen sich zur Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten wie beispielsweise Behandlungseinheiten, Untersuchungsliegen, patientennahe Flächen, sowie andere Flächen, wie z. B. Tische, Türklinken usw. (außer Acrylglas und alkoholempfindliche Materialien). Nicht geeignet für die Desinfektion invasiver Medizinprodukte.

Anwendung

Die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände sorgfältig mit dem getränkten Desinfektionstuch abwischen. Dabei ist auf eine vollständige Benetzung zu achten. Während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Die Menge, die auf die Oberfläche aufgebracht werden muss, ist abhängig von Oberflächenbeschaffenheit, Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchte.

Im Lebensmittelbereich die Flächen abschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität behandeln. Gegebenenfalls die Flächen mit einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Wirksamkeit	Einwirkzeit
Tuch	
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (<i>C. albicans</i>) nach VAH, 4-Feldertest (EN 16615)	5 min. (hohe Belastung)
Tränklösung	
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (<i>C. albicans</i>) nach EN 13727, EN 13624	1 min. (hohe Belastung)
Viruswirksamkeit	
Begrenzt viruzid Vaccinia (MVA) nach EN 14476	1 min. (niedrige Belastung)
Begrenzt viruzid Vaccinia (MVA) nach Virus-4-Feldertest (modified EN 16615)	1 min. (niedrige Belastung)

VERTRIEB DURCH PEPPLER GMBH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen
Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06
www.peppler.de/ www.peppler-shopwelten.de

HERSTELLER LABORATORIUM DR. DEPPE

Hooghe Weg 35 • 47906 Kempen
Tel.: +49 (0) 2152 5565-0
www.drdeppe.de

Micro Clean ECO – BioWipes

Medizinproduktklasse

Ila

Biozidregistriernummer

N-78076 (XL)

N-78074 (XXL)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zusammensetzung

100 g Tränklösung enthalten:

20 g 1-Propanol

0,2 g Benzalkoniumchlorid

Chemisch-physikalische Daten

Farbe farblos

Aussehen getränktes Tuch

Zustand flüssig

pH-Wert (20°C) 5,7 - 7,8

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit

Flowpack 24 Monate

Eimer und Nachfüllpack 36 Monate

Haltbarkeit nach Anbruch

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Nur feuchte Tücher verwenden.

Anforderungen an die Lagerumgebung

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

Beachten Sie die nachfolgenden Temperaturgrenzen für die Lagerung.

Temperaturgrenzen für kurzzeitige Lagerung (Min. - Max.)	0 – 40 °C
Umgebungstemperatur für dauerhafte Lagerung gemäß Haltbarkeit (Min.- Max.)	20 – 25 °C

Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften des zuständigen Bundeslandes erfolgen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt.

Produktsortiment & Spezifikation

Artikelnummer	Gebindegröße	Gebindeart	Verpackungseinheit
2433	70 Tücher 30 x 30 cm	Nachfüllpack	12 x 70 Tücher
2433-140	140 Tücher 15 x 30 cm	Nachfüllpack	12 x 140 Tücher
2443	80 Tücher 20 x 22 cm	Nachfüllpack	24 x 80 Tücher

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
2415	Dosiereimer rund (3,4 L, Durchmesser: 17 cm, Höhe: 15 cm)
2415EF	6 Universaletiketten für vorgetränkte Tücher
2419	Multimarker, schwarz mit Radierer, wasserfester Stift zur Beschriftung

VERTRIEB DURCH

PEPLER GMBH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen

Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06

www.pepler.de/ www.pepler-shopwelten.de

HERSTELLER

LABORATORIUM DR. DEPPE

Hooghe Weg 35 • 47906 Kempen

Tel.: +49 (0) 2152 5565-0

www.drdeppe.de