

Produktdatenblatt Vorgetränkte Tücher

Stand: 2021-11-03

peppler.de



- ✓ Gebrauchsfertige Tücher
- ✓ Aldehyd- und alkoholfrei
- ✓ VAH-zertifiziert
- ✓ **Begrenzt viruzid PLUS**
- ✓ Sehr gute Materialverträglichkeit

pepp free – BioWipes

Art-Nr.: 2446/ 2436/ 2436-140

CE 0044

Produktbeschreibung

pepp free – BioWipes, sind gebrauchsfertige, alkohol- und aldehydfreie Oberflächendesinfektionstücher. Die Tücher bestehen aus 100% biologisch abbaubarem Tuchmaterial mit optimaler Wirkstoffabgabe.

Anwendungsbereich

pepp free – BioWipes eignen sich zur Schnelldesinfektion von wischbeständigen Medizinproduktoberflächen, Geräteoberflächen und Gegenständen im patientennahen Umfeld, Oberflächen in der Industrie und Lebensmittelbereichen.

Anwendung

Die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände sorgfältig mit dem getränkten Desinfektionstuch abwischen. Dabei ist auf eine vollständige Benetzung zu achten. Während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Die Menge, die auf die Oberfläche aufgebracht werden muss, ist abhängig von Oberflächenbeschaffenheit, Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchte.

Im Lebensmittelbereich die Flächen abschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität behandeln. Gegebenenfalls die Flächen mit einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Wirksamkeit	Einwirkzeit
Tuch	
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (<i>C. albicans</i>) nach VAH, 4-Feldertest (EN 16615)	5 min. (hohe Belastung)
Tränklösung	
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (<i>C. albicans</i>) nach EN 13727, EN 13624	1 min. (hohe Belastung)
Tuberkulozid (<i>M. terrae</i>) nach EN 14348	60 min. (hohe Belastung)
Viruswirksamkeit	
Begrenzt viruzid Vaccinia (MAV) nach EN 14476	1 min. (hohe Belastung)
Begrenzt viruzid Vaccinia (MAV) nach Virus-4-Feldertest	1 min. (niedrige Belastung)
Begrenzt viruzid PLUS Adeno-, Noro- und Rotaviren nach EN 14476	60 min. (hohe Belastung)

VERTRIEB DURCH PEPPLER GMBH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen
Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06
www.peppler.de/www.peppler-shopwelten.de

HERSTELLER

LABORATORIUM DR. DEPPE
Hooghe Weg 35 • 47906 Kempen
Tel.: +49 (0) 2152 5565-0
www.drdeppe.de

pepp free – BioWipes

Medizinproduktklasse

Ila

Biozidregistriernummer

N-84744 (XL)

N-84729 (XXL)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zusammensetzung

100 g Tränklösung enthalten:

0,1 g 2-Phenoxyethanol

0,35 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid

0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Chemisch-physikalische Daten

Farbe	farblos
Aussehen	getränktes Tuch
Zustand	flüssig
pH-Wert (20°C)	7 - 9

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit

Flowpack 24 Monate

Eimer und Nachfüllpack 36 Monate

Haltbarkeit nach Anbruch

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wieder verschließen.

Nur feuchte Tücher verwenden.

Anforderungen an die Lagerungs- umgebung

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

Beachten Sie die nachfolgenden Temperaturgrenzen für die Lagerung.

Temperaturgrenzen für kurzzeitige Lagerung (Min. - Max.)	0 – 40 °C
Umgebungstemperatur für dauerhafte Lagerung gemäß Haltbarkeit (Min.- Max.)	20 – 25 °C

Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften des zuständigen Bundeslandes erfolgen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt.

Produktsortiment & Spezifikation

Artikelnummer	Gebindegröße	Gebindeart	Verpackungseinheit
2436	70 Tücher 30 x 30 cm	Nachfüllpack	12 x 70 Tücher
2436-140	140 Tücher 15 x 30 cm	Nachfüllpack	12 x 140 Tücher
2446	80 Tücher 20 x 22 cm	Nachfüllpack	24 x 80 Tücher

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
2415	Dosiereimer rund (3,4 L, Durchmesser: 17 cm, Höhe: 15 cm)
2415EF	6 Universaletiketten für vorgetränkte Tücher
2419	Multimarker, schwarz mit Radierer, waserfester Stift zur Beschriftung

VERTRIEB DURCH

PEPLER GMBH

Marburger Str. 251 • 35396 Gießen

Tel.: +49 (0) 641-952 05-99 / AT: 01-470 17 06

www.peppler.de/ www.peppler-shopwelten.de

HERSTELLER

LABORATORIUM DR. DEPPE

Hooghe Weg 35 • 47906 Kempen

Tel.: +49 (0) 2152 5565-0

www.drdeppe.de